



Filtration Bactériologique Pour Le Vide Médical

1 Généralités:

1.1 Séries:

Cette instruction de service concerne la filtration bactériologique pour le vide médical.

Les filtrations sont dimensionnées selon les débits des installations.

1.2 Description:

Deux versions peuvent être proposées :

1.2.1 Filtration simple avec by-pass constituée de:

- d'un pot de purge pour la récupération des solides et liquides
- d'un filtre bactériologique en série avec le pot de purge
- d'un by-pass avec deux vannes trois voies permettant la vidange du pot et le remplacement du filtre bactérie

1.2.2 Filtration double avec by-pass constituée de:

- d'un pot de purge pour la récupération des solides et liquides
- d'un filtre bactériologique en série avec le pot de purge
- d'un by-pass avec deux vannes trois voies et incluant un filtre bactériologique permettant la continuité de la filtration lors de la maintenance sur le pot et sur le filtre bactérien principal

2 Implantation

La filtration bactériologique doit être mise en place dans le local technique avant l'ensemble de la centrale de vide médical.

Elle est prévue pour une fixation murale et doit rester accessible pour la maintenance.

3 Maintenance

Les cartouches bactériologiques doivent être changées régulièrement et selon le degré d'impureté de l'air aspiré (possibilité de mettre en option un indicateur de colmatage).


Nous préconisons le remplacement des cartouches au plus tard tous les six mois et lors de chaque changement vérifier l'état du pot de purge et le nettoyer le cas échéant.

⚠ Lors du remplacement des cartouches bactériologiques et du nettoyage des pots de purge toutes les précautions doivent être prises pour la manipulation (selon normes en vigueur) soit port de gants étanches et masque de protection sur le visage.

⚠ Les filtres bactériologiques et pot de purge constituent des éléments à éliminer suivant les règles en vigueur dans chaque pays. Les filtres bactériologiques sont à éliminer par l'établissement hospitalier même en cas de contrat de maintenance avec la société Rietschle.

4 Cartouches de rechanges

Référence cartouches identiques pour chaque filtre: 910044B

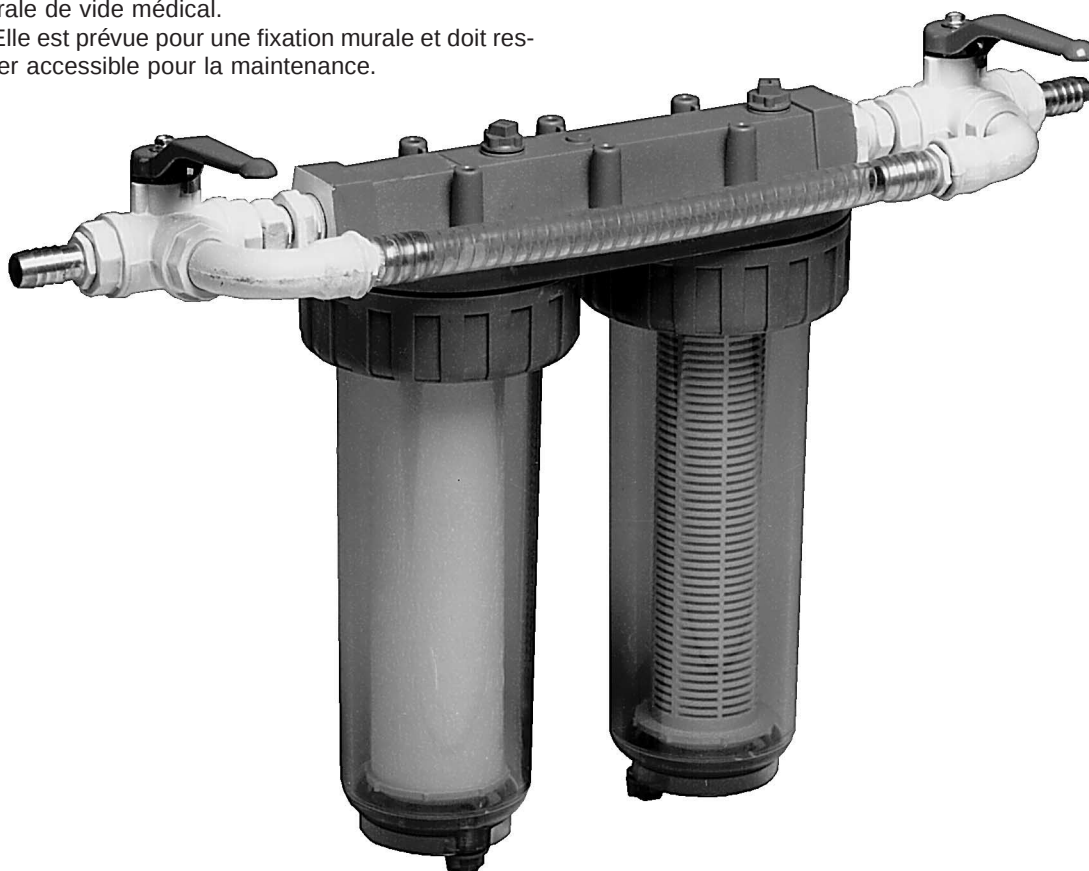

BF 60/3

1.9.98

**Werner Rietschle
GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM
GERMANY

☎ 07622 / 392-0

Fax 07622 / 392300

E-Mail: info@rietschle.com

<http://www.rietschle.com>

Rietschle Sàrl

8, Rue des Champs

68220 HÉSINGUE
FRANCE

☎ 0389 / 702670

Fax 0389 / 709120

E-Mail: commercial@rietschle.fr

<http://www.rietschle.fr>